

HealthySmile



Blekemiddelet Whiteness Perfect som brukes i HealthySmile, gir svært gode resultater på vanlige misfarginger, men er også effektiv ved behandling av kraftigere misfarginger forårsaket av f.eks legemidler og fluor.

HealthySmile har et meget høyt innhold av vann og forskning viser at fluoret som finnes i blekemiddelet styrker tannen! Metoden er godt dokumentert og har vært på markedet i over 25 år.

Steg for steg....

1. Undersøkelse

Tannlegen undersøker tennene dine og bedømmer ut i fra det om en blekebehandling kan gjennomføres og ønskede resultater kan oppnås. For å lage blekeskinner taes et avtrykk av dine tenner. Det gjøres enten ved avtrykkskje med avtrykksmateriale, eller ved en intraoral scan av tennene dine.

2. Blekeskinner

Tannlegen sender avtrykket til LIC Scadenta Tannteknikk, som fremstiller individuelle blekeskinner til deg. Disse pakkes i en eksklusiv eske som inneholder blekemiddel og skinner samt instruksjoner. Dette sendes tilbake til tannlegen. Du får en ny timeavtale for gjennomgang av blekeprosessen

3. Påføring

Blekemiddelet påføres i den tynne skinnen og plasseres på tennene. Under blekeprosessen brytes karbamidperoxid ned til hydrogenperoxid som deretter brytes ned til oksygen som trenger inn i emaljen og dentinet (det porøse vevet som er under emaljen). Oksygenet bleker de misfargede overflatene og tannen får en lysere nyanse.

Innhold:

4 x 3 g blekemiddel i sprøyter, 10% eller 16%

2 x Individuelt tilpassede blekeskinner

1 x Oppbevaringseske

1 x Pasientinstruksjoner

LYKKE TIL!

